


条件：必ず CT 撮影した Dicom データ（非圧縮形式）をアップロード。

ダブルスキャンをご希望の場合には、ステントの Dicom データもアップロードしてください。

アップロード前に

- ① デスクトップ上でマウスを右一度クリックし、新規作成→フォルダを選択します。
- ② ①のフォルダの名前を変更します。（例：Dicom とか患者名など）
- ③ 患者さんの Dicom データの入っている CD-R の中身をすべて②にコピーします。
- ④ ③のフォルダ上でマウスを右一度クリックし、送る→圧縮（Zip 形式）フォルダを選択します。
- ⑤ ジッパーのついたフォルダが作成されました。アップロードするのはこのフォルダです。

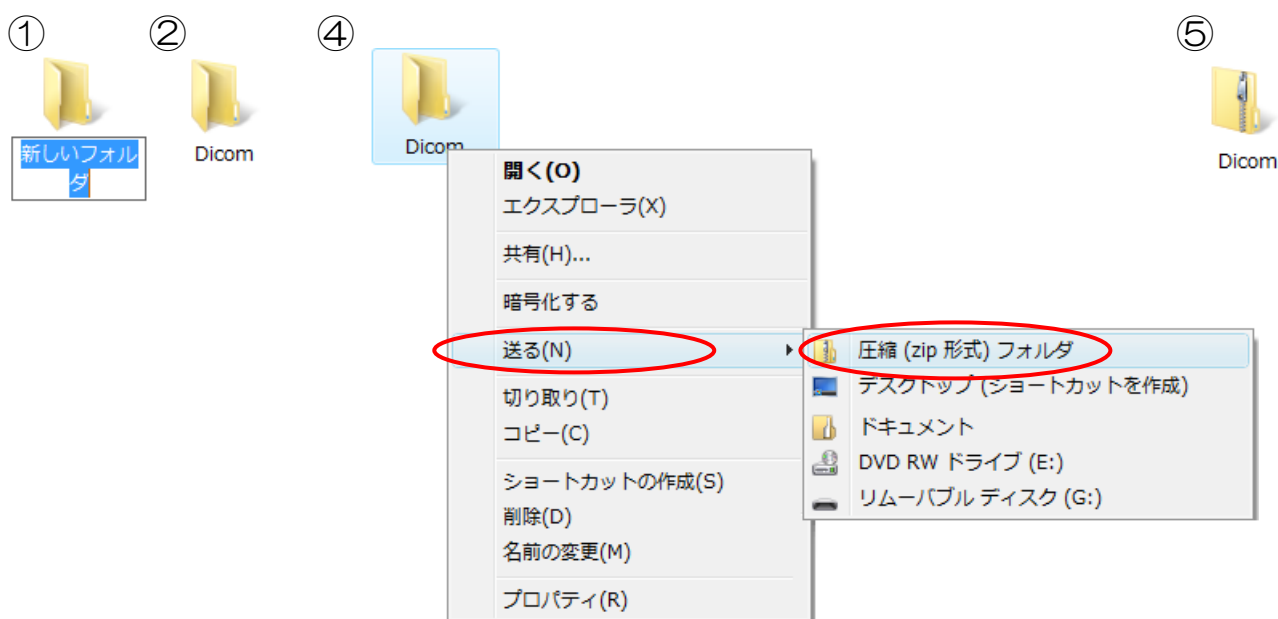

アップロードについて

SIMPLANT®の導入されているパソコンの場合、SIMPLANT®内のアイコン  からアクセスします。

<補足> SIMPLANT®の導入されていないパソコンの場合、次のアドレスからアクセスもできます。
<https://www.dentalplanit.com/>

1. DentalPlanit にサインインします。

ユーザ名、パスワードを入力し「サインイン情報を記憶」にチェックを入れて「サインイン」をクリックします。

2. 【新しい症例の開始】

「SIMPLANT®変換」を選択してください。

ホーム 症例一覧 新しい症例の開始

症例タイプ

DentalPlanit™により、(CB)CTや3Dインプラント計画症例をオンラインで管理することができます。開始したい症例の種類を選択してください。
適切なパラメータを用いて症例を作成するためのサポートが必要な場合は [ヘルプが必要な場合はここをクリックしてください](#)。当社カスタマーサービスチームより

▶ 推奨 ▶ すべてのサービス

▶ SIMPLANT®変換
「SIMPLANT®変換」を選択します

▶ GO SIMPLANT® Goの症例
SIMPLANT® Goの症例を開始するには、このオプションを選択してください

3. 処方箋の登録をします。

3-1. 【患者情報画面】患者名などを入力します。

ホーム 症例一覧 新しい症例の開始

新しいSIMPLANT®変換症例を開始する

1 患者情報

患者情報 (*入力必須項目)

識別

氏名(名) (半角英数字で入力してください) * aaa

氏名(姓) * bbb

カルテNo.:

患者の電話番号:

①患者名欄は必ずローマ字で入力してください
氏名(名)/氏名(姓)
<必須項目です>

2 変換指示

医療情報

性別: 不明 男性 女性

生年月日: 日 | 月 | 年

変換する部位*

上顎

下顎

下顎と上顎の両方

同じ治療計画に両方を置く

②部位を選択してください<必須項目です>

③「次のステップに進みます」をクリックします

治療の詳細:

患者: 部分的無歯顎 完全無歯顎

以下を提供します: CB(CT) ファイル SIMPLANT® ファイル

私は以下を使用します: SIMPLANT® Planner SIMPLANT® Pro SIMPLANT® View SIMPLANT® OneShot

入力不要！使用しません

注意

問題や既往歴

あなたと診療所のメンバーだけが問題や既往歴を閲覧できます。

入力不要

次のステップに進みます

キャンセル

Version 2.5.0.3. © 2013 Copyright DENTSPLY Implants NV. All Rights Reserved

ユーザー同意書 個人情報保護

3-2. 【変換指示画面】

1 患者情報
aaa bbb

2 変換指示

3 まとめ

変換指示

手順がわからない場合 [はこちらをクリック \(English\)](#)。ベストな手法を選択できるようにヘルプします。

請求書送付先
11-6
103-0005 中央区日本橋久松町
Tokyo
日本

(CB)CTデータを以下に変換する:

- SIMPLANT® Planner
- SIMPLANT® Pro
- SIMPLANT® OneShot
- SIMPLANT® O&O
- 3DオブジェクトのみSIMPLANT®ファイルに追加

SIMPLANT®ファイルに3Dオブジェクトを追加してください
追加オプションサービスは、全てのサービス・プロバイダーが提供しているものではないことにご注意ください。

- 石膏模型マッチング
- マーカー付のスキンスメントと軟組織の3Dオブジェクト
- FastTrackサージガイド用に処理

[表示を増やす](#)

戻る **次のステップに進みます**

重要

① **データ形式を選択!**
使用している SIMPLANT のタイプを選択してください

- SIMPLANT® Planner
- SIMPLANT® Pro
- SIMPLANT® OneShot

使用しません

A: 石膏模型
マッチング

B: ダブルスキャン
マッチング

C: ガイドオーダー
予定

② **オプションを選択します**
A: 石膏模型マッチング
B: ダブルスキャン
AかBを選択しCは必ず選択してください

③ 「次のステップに進みます」をクリックします

3-3. 【まとめ画面】 入力項目を確認します。訂正時には前画面に戻ります。

1 患者情報
aaa bbb

2 変換指示
3DオブジェクトのみSIMPLANT...
下顎と上顎の両方

3 まとめ

まとめ

変換 症例

患者識別
氏名(名): aaa 患者医療情報
氏名(姓): bbb 性別: 男性

支払方法

ノート: この請求情報は変換の支払いにのみ使用されます。DENTSPLY IH
変換クーポン

変換サービス

[DENTSPLY IH](#)
請求書送付先: 11-6, 103-0005 中央区日本橋久松町, Tokyo, 日本

追加オプションのみ(変換済みデータのみ対象)のため 上顎 および 下顎 情報なし

FastTrackサージガイド用に処理 情報なし

石膏模型マッチング
スタディモデル(石膏模型)とワークスアップの送付先: [DENTSPLY IH](#) 情報なし
[石膏模型送付に関する注意事項](#)

見積合計 情報なし

戻る **症例の作成とファイルの追加** キャンセル

入力不要! 使用しません
通常はすでに情報をいただいているので、不要です

① 確認画面です

修正箇所があれば
「戻る」ボタンで前画面に戻ります

② 「症例の作成とファイルの追加」をクリックします

4. アップロード

4-1. データをアップロードします。

「CT ファイルを追加」あるいは「アップロード」ボタンをクリックします

この画面の場合もあります

アップロードボタンをクリックします

保存されている場所

① Zip ファイルをクリックします

② 「開く」をクリックします



- ☆ 必ず Zip 形式の Dicom データを選択します。
- ☆ 画面がスリープ状態になると、アップロードが中断されてしまいます。設定を変えてください。

4-2. アップロード中に次のエラーメッセージが数回出ることがあります。

「いいえ」を選択して進んでください。アップロードが継続されます。

<注意> 「はい」を選択するとアップロードが中断されます

Web ブラウザー

このスクリプトの実行を中止しますか?

このページのスクリプトが、Web ブラウザーの実行速度を遅くしています。スクリプトを実行し続けると、コンピューターが応答しなくなる可能性があります。

いいえ(N)

アップロード経過

アップロード中。このダイアログを閉じないで下さい。

転送状態 4000000 (14231040バイト) 転送しました。

中断

5.【症例管理画面】アップロード完了

オプションで石膏模型マッチングを選択すると、登録アドレスにメールが届きます。模型が到着してからマッチング処理開始となります。件名 DentalPlanit:Send Plaster Model reminder for case xxxxx

こちらは最初に登録した処方箋（患者情報）です

Dicom データが追加されました

<変換途中の状態>

石膏模型データはデンツプライシロナにてアップロードします。Dicom データ、模型データが両方ともアップロードされただけで、まだ変換処理は終わっていません。


ダウンロードについて（処理済データの受け取り）

1. データ処理が完了すると・・・

① ご登録のアドレスに以下のメールが届きます。
「DentalPlanit：症例xxxxxの準備が整いました」

② 「症例 xxxxx」の xxxxx をクリックします。
（※ ウィルス対策ソフトの導入状況により、件名に「SPAM」の文字が入ることがあります。）

1.の動作を必ず行わないと「症例一覧」画面には記載されませんのでご注意ください。

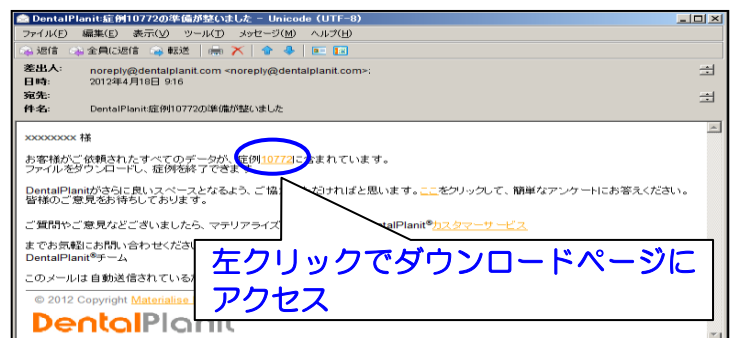


2. サインインの画面になります。

ユーザー名・パスワードを入力後、クリックしてサインインします。

ユーザー名とパスワードは、OnlineOrder と共通です

3. 【症例管理】画面になります。

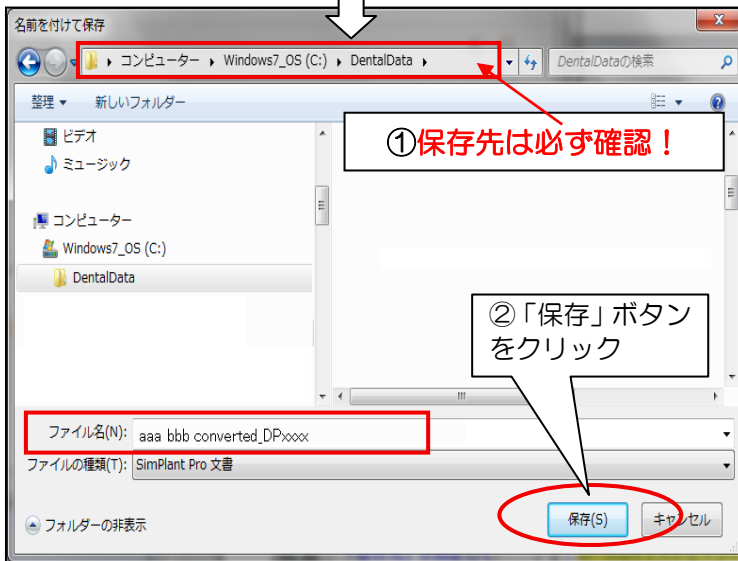

<保存したら終了です>

- ①SIMPLANT®が入っているパソコンの場合の保存先は・・・
ローカルディスク C ドライブのフォルダ「DentalData」→通常どおり SIMPLANT®で開きます
- ②SIMPLANT®が導入されていないパソコンの場合は・・・
任意の場所に保存後、USB メモリなどでコピーして移動→①と同じ保存先に保存→SIMPLANT®で開きます

<お問合せ先>

2016/09/01

ご不明な点は デンツプライシロナ株式会社「テックサービス」までお問い合わせください。



TEL 受付(平日)9:00~17:00

0120-016-152



E-mail

Simplant-JP-Service@dentsplysirona.com



FAX

0120-280-630