

条件：必ず SIMPLANT®データ (Spr ファイル) をアップロード。

ダブルスキャンをご希望の場合には、ステントの Dicom データもアップロードしてください。

※ 間違えて、Spr ファイルではなく Dicom データを送ると、3D への変換料、模型マッチング・ダブルスキャン費用が有償となります。

アップロードについて

SIMPLANT®の導入されているパソコンの場合、SIMPLANT®内のアイコン  からアクセスします。

<補足> SIMPLANT®の導入されていないパソコンの場合、次のアドレスからアクセスもできます。
<https://www.dentalplanit.com/>


<ワンポイントアドバイス>

☆ 事前に spr ファイルを「低品質-高圧縮」で保存すると、サイズが小さくなりアップロード時間が短縮できます。

データを開き、メニューバーから「ファイル」→「名前をつけて保存」
 →「圧縮 Jpeg 画像として保存」にチェック
 →「低品質-高圧縮」を選択→「保存」をクリックします。


※低品質といっても画質は圧縮前と変わりません。

一度圧縮したものは再度の圧縮率の変更は行えませんのでお気をつけください。

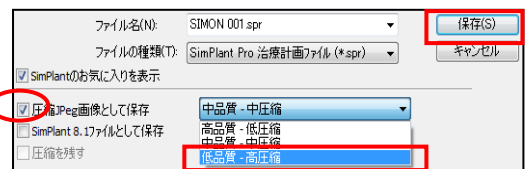


☆ 計画済の SIMPLANT®データをアップロードするときは計画ロックをしてください。

メニューバーから「計画」→「ロック」をクリックします。

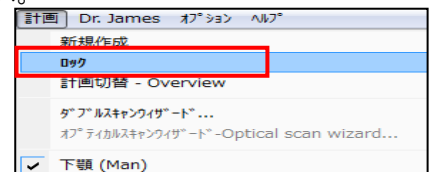

1. DentalPlanit にサインインします。

ユーザ名、パスワードを入力し「サインイン情報を記憶」にチェックを入れて「サインイン」をクリックします。

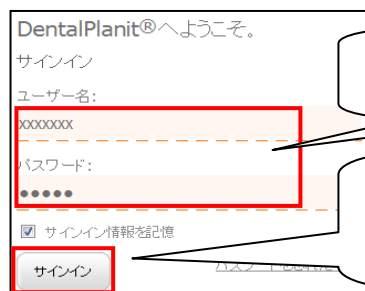

ユーザ名とパスワードは、OnlineOrder と共通です

「サインイン情報を記憶」にチェックを入れて「サインイン」をクリックします

2. 【新しい症例の開始】

「SIMPLANT®変換」を選択してください。



3. 処方箋の登録をします。

3-1. 【患者情報画面】患者名などを入力します。

ホーム 症例一覧 新しい症例の開始

新しいSIMPLANT®変換症例を開始する

1 患者情報

患者情報
(*入力必須項目)

識別
氏名(名) (半角英数字で入力してください) * aaa
氏名(姓) * bbb
カルテNo.:
患者の電話番号:

医療情報
性別: 不明 男性 女性
生年月日: 日 -- 月 -- 年 --

変換する部位*
 上顎
 下顎
 下顎と上顎の両方
 同じ治療計画に両方を置く

治療の詳細:
患者: 部分的無歯顎 完全無歯顎
以下を提供します: CB(CT) ファイル SIMPLANT®ファイル
私は以下を使用します: SIMPLANT® Planner SIMPLANT® Pro SIMPLANT® View SIMPLANT® OneShot

問題や既往歴
あなたと診療所のメンバーだけが問題や既往歴を閲覧できます。

入力不要！使用しません

注意

性別を選択してください

①患者名欄は必ずローマ字で入力してください
氏名(名)/氏名(姓)
<必須項目です>

②部位を選択してください<必須項目です>

上下顎両方の変換時に選択

□にチェックを入れないでください

入力不要

③「次のステップに進みます」をクリックします

次のステップに進みます

キャンセル

Version 2.5.0.3. © 2013 Copyright DENTSPLY Implants NV. All Rights Reserved

ユーザー同意書 個人情報保護

3-2. 【変換指示画面】

1 患者情報
aaa bbb

2 変換指示

変換指示

手順がわからない場合 [はこちらをクリック \(English\)](#)。ベストな手法を選択できるようにヘルプします。

請求書送付先

11-6
103-0005 中央区日本橋久松町
Tokyô
日本

(CB)CTデータを以下に変換する:

- SIMPLANT® Planner
- SIMPLANT® Pro
- SIMPLANT® OneShot
- SIMPLANT® O&O ⓘ

これを選択すると、別途費用がかかります

3DオブジェクトのみSIMPLANT®ファイルに追加 ⓘ

SIMPLANT®ファイルに3Dオブジェクトを追加してください
追加オプションサービスは、全てのサービス・プロバイダーが提供しているものではないことにご注意ください。

- 石膏模型マッチング ⓘ
- マーカー付のスキャンステントと軟組織の3Dオブジェクト ⓘ
- FastTrackサージガイド用に処理 ⓘ

[表示を増やす](#)

②オプションを選択します
A:石膏模型マッチング
B:ダブルスキャン
AかBを選択しCは必ず選択してください

次のステップに進みます

重要

①これだけ選択！
3D 変換処理は行わないという意味です
※3D オブジェクトとは模型のことです

A: 石膏模型 マッチング

B: ダブルスキャン マッチング

C: ガイドオーダー 予定

③「次のステップに進みます」をクリックします

3-3. 【まとめ画面】 入力項目を確認します。訂正時には前画面に戻ります。

1 患者情報
aaa bbb

2 変換指示
3DオブジェクトのみSIMPLANT...
下顎と上顎の両方

3 まとめ

まとめ

変換 症例

患者識別
氏名(名): aaa
氏名(姓): bbb

患者医療情報
性別: 男性

支払方法

※: この請求情報は変換の支払いに関してのみ使用されます。DENTSPLY IH
変換クーポン

変換サービス

DENTSPLY IH
請求書送付先: 11-6, 103-0005 中央区日本橋久松町, Tokyo, 日本

追加オプションのみ(変換済みデータのみ対象)のため 上顎および下顎	情報なし
<input checked="" type="checkbox"/> FastTrackサージガイド用に処理	情報なし
<input checked="" type="checkbox"/> 石膏模型マッチング ⓘ スタディモデル(石膏模型)とワックスアップの送付先: DENTSPLY IH 石膏模型送付に関する注意事項	情報なし
見積合計	情報なし

①確認画面です

②「症例の作成とファイルの追加」をクリックします

修正箇所があれば「戻る」ボタンで前画面に戻ります

戻る 症例の作成とファイルの追加 キャンセル

入力不要！使用しません
通常はすでに情報をいただいているので、不要です

4. アップロード

4-1. データをアップロードします。

「SIMPLANT ファイル」あるいは「アップロード」ボタンをクリックします

この画面の場合もあります

アップロードボタンをクリックします

① Spr ファイルをクリックします

② 「開く」をクリックします

☆ 必ず Spr ファイルを選択します。

Dicom データをアップロードすると、データ作成費用がかかります。

☆ 画面がスリープ状態になると、アップロードが中断されてしまいます。設定を変えてください。

注意

4-2. アップロード中に次のエラーメッセージが数回出ることがあります。

「いいえ」を選択して進んでください。アップロードが継続されます。

<注意> 「はい」を選択するとアップロードが中断されます

アップロード経過

アップロード中。このダイアログを閉じないで下さい。

転送状態 4000000(14231040バイト)転送しました。

転送完了後にこのダイアログを開じる

中断

5.【症例管理画面】アップロード完了

ホーム 症例一覧 新しい症例の開始

症例管理 変換 症例 aaa bbb

状況:

ファイル管理 (ID = 42253) [症例の詳細に戻る...](#)

ファイルの横にある「SIMPLANT®で開く」ボタンを使用し、治療計画ソフトウェアで直接ファイルを開きます

CTファイルを追加 SIMPLANTファイル STLファイルを追加

こちらは最初に登録した処方箋 (患者情報) です

種類	ファイル名	サイズ	変更された	変更者
<input type="checkbox"/>	Conversion Prescription 新規	0 mb	04/10/2014 19:53:02	Conversion.MD.J
<input type="checkbox"/>	No conversion test data_Carlos 新規	14.14 mb	04/10/2014 20:11:18	Conversion.MD.J

DentalPlanit®はウイルスおよびマルウェアのスキャンは行いませんのでご注意ください。

ユーザー同意書 個人情報保護

Spr ファイルが追加されました

オプションで石膏模型マッチングを選択すると、登録アドレスにメールが届きます。模型が到着してからマッチング処理開始となります。件名 DentalPlanit:Send Plaster Model reminder for case xxxxx

<変換途中の状態>

ようこそ、Conversion DHI ([プロファイル](#), [サインアウト](#))

アクティブな症例数 (283)

歯科専門医が協会パートナー、サービスプロバイダー、専門家と症例を管理するグローバルオンライン治療計画スペース

ホーム 症例一覧 新しい症例の開始

+ [こちらをクリックして新しい症例をスタート](#)

症例	変更日	状況	処理が必要 ▼
bbb aaa 新規	04/10/2014	変換:プロジェクト待ち	必要なアクションはありません
	02/10/2014	症例が完了しました	症例の終了 プロジェクトのダウンロード
	01/10/2014	症例が完了しました	症例の終了 プロジェクトのダウンロード

石膏模型データはデンツプライシロナにてアップロードします。Spr ファイル、模型データが両方ともアップロードされただけで、まだ変換処理は終わっていません。

ダウンロードについて（処理済データの受け取り）

1. データ処理が完了すると・・・

① ご登録のアドレスに以下のメールが届きます。
「DentalPlanit：症例xxxxxの準備が整いました」

② 「症例xxxx」のxxxxをクリックします。
(※ ウィルス対策ソフトの導入状況により、件名に「SPAM」の文字が入ることがあります。)

1.の動作を必ず行わないと「症例一覧」画面には記載されませんのでご注意ください。

DentalPlanit 症例10772の準備が整いました - Unicode (UTF-8)

お客様がご依頼されたすべてのデータが、[症例10772](#)にアップロードされています。

DentalPlanitがさらに良いスペースとなるよう、ご協力をいただければと思います。ここをクリックして、簡単なアンケートにお答えください。

ご質問やご意見などございましたら、マテリアライズ [DentalPlanit®カスタマーサービス](#)

までお気軽にお問い合わせください。
DentalPlanit®チーム

このメールは自動送信されている場合があります。

© 2012 Copyright Materialise.

DentalPlanit

左クリックでダウンロードページにアクセス

2. サインインの画面になります。

ユーザー名・パスワードを入力後、クリックしてサインインします。

DentalPlanit®へようこそ。

サインイン

ユーザー名:

パスワード:

サインイン情報を記憶

[パスワードを忘れた場合](#)

ユーザ名とパスワードは、OnlineOrder と共通です

3. 【症例管理】画面になります。

ホーム 症例一覧 新しい症例の開始

症例管理 変換 症例

状況: 症例が完了しました

症例の詳細 (ID = xxxxx)

プロジェクト: aaa bbb 新規
 converted_DPxxxx 新規
 Conversion Prescription 新規
 DIH Dental.aaa bbb 新規

患者情報 サービス

名前: **患者名_converted_DPxxxx** のファイル名の上でクリックします
 違うデータをダウンロードしないように**注意!**
 例: aaa bbb_converted_DP1111

別のプロバイダーを選択したい場合や、症例を修正・キャンセルしたい場合は、[カスタマーサービス](#)までご連絡ください。

Version 2.5.0.3. © 2013 Copyright DENTSPLY Implants, Inc. All Rights Reserved

ファイルのダウンロード

このファイルを開くか、または保存しますか?

名前: aaa bbb converted_DP xxxxx spr
 種類: SimPlant Pro 文書
 発信元: www.dentalplanit.com

開く(O) **保存(S)** キャンセル

インターネットのファイルは役に立ちますが、ファイルによってはコンピューターに問題を起こすものもあります。発信元が信頼できない場合は、このファイルを開いたり保存したりしないでください。[危険性の説明](#)

名前を付けて保存

①保存先は必ず確認!

②「保存」ボタンをクリック

保存(S) キャンセル

＜保存したら終了です＞

①SIMPLANT®が入っているパソコンの場合の保存先は・・・
ローカルディスク C ドライブのフォルダ「DentalData」 →通常どおり SIMPLANT®で開きます

②SIMPLANT®が導入されていないパソコンの場合は・・・
 任意の場所に保存後、USB メモリなどでコピーして移動→①と同じ保存先に保存→SIMPLANT®で開きます

＜お問合せ先＞

2016/09/01

ご不明な点は デンツプライシロナ株式会社「テックサービス」までお問い合わせください。



TEL 受付(平日)9:00~17:00
 0120-016-152



E-mail
 Simplant-JP-Service@dentsplysirona.com



FAX
 0120-280-630